

9



Utilisation d'un tournevis (non inclus)
Installer 1 vis (#4 x 1/2") à l'extrémité
de la bande



Visser jus'à ce
que la vis affleure

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

La butée d'extension limite la flexion du talon et réduit la flexion autorisée longueur de l'étau principal. Pour les patients dont le mollet est faible, elle a pour effet de diminuer la réaction de frappe du talon provoquant un claquement de pied. Il rend l'attelle plus rigide pour maintenir l'angle pied-jambe à 90° pour un meilleur contrôle de l'hyperextension du genou.



1
Attaque au talon

2
Le pied claque

3
SANS la limitation d'extension



1
Attaque au talon

3
AVEC la limitation d'extension

⚠ La limitation d'extension augmente la charge descendante sur le support du talon. ⚠
Le support du talon nécessitera plus de friction pour permettre une fixation correcte sur la semelle.
Il est important de valider l'adhérence du talon par friction et d'avoir une chaussure avec des aspérités de crêtes décentes sur les bords extérieurs de la semelle.
Voir les documents d'instructions de montage.

Turbo  **Med**TM
ORTHOTICS

KIT DE LIMITATION À L'EXTENSION SMALL-MEDIUM-LARGE Instructions d'installations Ref (MXT-STOP-SML)



Les indications cliniques
Pied tombant combiné avec :

- Hyperextension du genou
- Atrophie des mollets
- Spasticité



NOUVEAU

Code LPP 7110016


DIRECTIVE SUR LA SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

⚠ Lisez ce document dans son intégralité avant d'utiliser le produit

- Ce produit est conçu pour être installé sur les TurboMed XTERN
- Ce kit optionnel de butée d'extension est conçu pour fournir une rigidité supplémentaire en limitant la réaction de frappe du talon et ainsi limiter l'effet de claquement du pied et limiter l'hyperextension du genou (récurvatum).
- Le patient doit toujours utiliser le produit en connaissant ses propres limites.
- Saisir les consignes de sécurité afin d'éviter les blessures ou les dommages au produit.
- Ce produit est destiné à un seul patient.
- Faire preuve de prudence lors de la manipulation du produit.-S'assurer que l'orthèse et la butée d'extension sont correctement appliquées et qu'elles s'ajustent correctement.
- Vérifier régulièrement le produit pour voir s'il fonctionne toujours correctement.
- Cesser d'utiliser le produit et/ou l'option si l'un de ses composants est ou semble être usé ou endommagé ou dans un état non approprié.
- Respecter les dispositions légales et les règles d'assurance relatives à la conduite de tout type de véhicule à moteur et faites tester vos compétences de conduite par l'autorité compétente.
- Arrêter d'utiliser le produit si des changements inhabituels sont observés sur le corps (ex. : développement d'une blessure, aggravation de la douleur, etc.)
- Arrêter d'utiliser le produit si vous constatez des modifications ou une perte de fonctionnalité et faites-le inspecter par un professionnel de santé certifié.
- Contacter et demander conseil à un professionnel de la santé, un orthésiste, un kinésithérapeute ou un médecin si vous constatez des frottements, des blessures ou d'autres types de plaies causés par l'utilisation du produit.
- Nettoyer le produit à intervalles réguliers.
- Inspecter l'installation finale avant d'utiliser le produit. Rechercher tout point de contact entre la chaussure et l'orthèse.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES EN CAS D'UTILISATION DE SANDALES OUVERTES OU DE CHAUSSURES LÉGÈRES

OKO
OKO SOLUTION

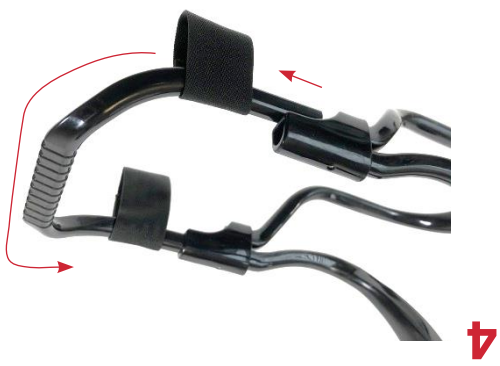

Glisser les deux bandes de fixation des sangles




Réinstaller la section avant en «U» et la vis de réglage



Utiliser une clé allen de 1/16" et retirer une vis de réglage en tenant la partie avant en «U» sur un seul côté.



Extraire un côté de la section «U» avant

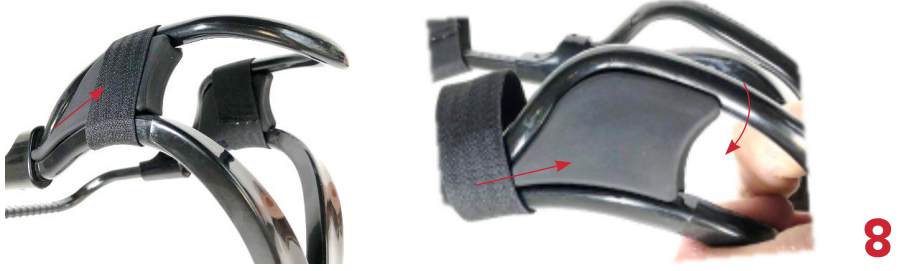

8

La jonction cousue de la sangle doit être orientée vers l'intérieur de l'orthèse
Comprimer fermement le support du talon et faites glisser les deux bandes de fixation de la sangle en place.
Les fixations de sangle sont serrées et peuvent nécessiter une certaine force pour être en place.



7

Ouvrir largement la partie de soutien du talon
Pousser les deux blocs d'arrêt de l'extension fermement en place jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec le joint noir




!

POUR ORTHÈSE DE TAILLE SMALL SEULEMENT

Taille SMALL
seulement

Pour un ajustement parfait, vous pouvez enlever (couper) 4 mm sur la lèvre avant

Conçu pour XTERN SMALL-MEDIUM-LARGE

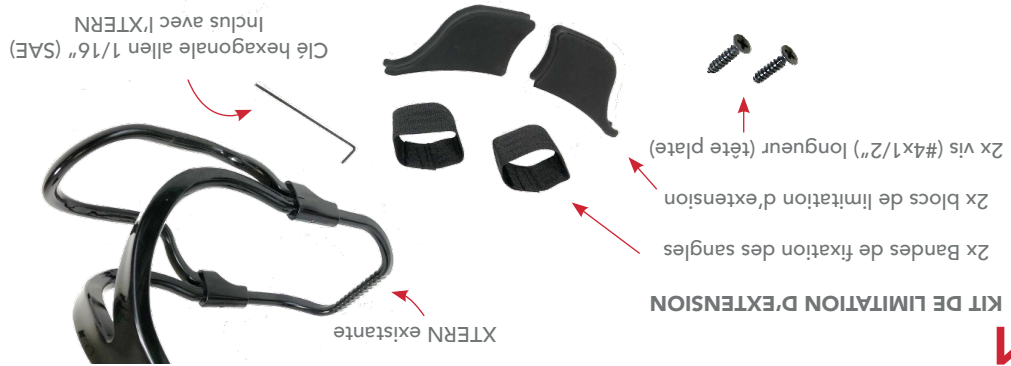

2x vis (#4x1/2") longueur (tête plate)
2x blocs de limitation d'extension
2x Bandes de fixation des sangles

Clé hexagonale allen 1/16" (SAE)
Inclus avec l'XTERN

XTERN existante