


9

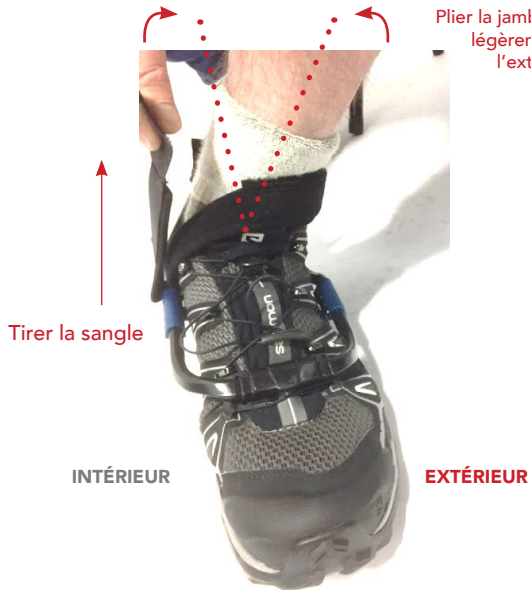

Tirer la sangle

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Tirer fermement sur la sangle pour créer une tension. **Tout en tendant la sangle de cheville, essayez de plier légèrement la jambe/la cheville vers l'extérieur.**



INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

L'installation du côté gauche devrait ressembler à ceci. (Le côté droit doit être à l'opposé).

10



Plier la jambe/ la cheville légèrement vers l'extérieur

Attacher le velcro

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Fixer l'extrémité du velcro sur la sangle pendant que votre la jambe/la cheville est légèrement pliée vers l'extérieur.



Si nécessaire, vous pouvez couper une longueur supplémentaire de sangles avec des ciseaux.



Avant la coupe, enlever le velcro en ouvrant les deux rabats de velcro. Réinstaller lorsque la découpe est terminée.

Inspecter l'installation finale avant d'utiliser le produit. Rechercher tout point de contact entre la chaussure et l'attelle. Vous aurez peut-être besoin de faire quelques essais pour trouver la tension parfaite afin de maximiser le confort

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES EN CAS D'UTILISATION DE SANDALES OUVERTES OU DE CHAUSSURES LÉGÈRES.

Turbo Med
ORTHOTICS

SANGLE DE STABILISATION DE CHEVILLE

Instructions d'installation
Ref (MXT-SSTAB-SML)



NOUVEAU

Code LPP 7110016

Les indications cliniques

- Instabilité légère et modérée de la cheville
- Inversion de la cheville




DIRECTIVE SUR LA SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Ce produit est conçu pour être installé sur l'attelle de pied externe TurboMed FS3000.
- Cette sangle de cheville optionnelle est conçue pour apporter une stabilité latérale supplémentaire aux patients présentant une légère instabilité de la cheville.
- Le patient ne doit pas compter sur cette sangle de cheville comme une assurance contre les blessures à la cheville.
- Le patient doit toujours utiliser le produit en connaissant ses propres limites.
- Respecter les consignes de sécurité afin d'éviter les blessures ou les dommages au produit.
- Ce produit est destiné à un seul patient.
- Faire preuve de prudence lors de la manipulation du produit.
- Veiller à ce que l'orthèse et la chevillère soient correctement appliquées et qu'elles soient bien ajustées.
- Vérifier régulièrement le produit pour voir s'il fonctionne toujours correctement.
- Cesser d'utiliser le produit et/ou l'option si l'un de ses composants est ou semble être usé ou endommagé ou en mauvais état.
- Respecter les règles juridiques et d'assurance relatives à la conduite de tout type de véhicule à moteur et faites tester vos compétences de conduite par l'autorité compétente.
- Arrêter d'utiliser le produit si des changements inhabituels sont observés sur le corps (ex. : développement d'une blessure, aggravation de la douleur, etc.)
- Cesser d'utiliser le produit en cas de modification ou de perte de fonctionnalité et faites-le inspecter par un professionnel de santé dans un centre certifié.
- Contacter et faites-vous conseiller par un professionnel de la santé, un orthésiste, un kinésithérapeute ou un médecin si vous subissez des frottements, des blessures ou d'autres lésions causées par l'utilisation du produit.
- Nettoyer le produit à intervalles réguliers.
- Inspecter l'installation finale avant d'utiliser le produit. Rechercher tout point de contact entre la chaussure et l'orthèse.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES EN CAS D'UTILISATION DE SANDALES OUVERTES OU DE CHAUSSURES LÉGÈRES

OKO
OKO SOLUTION

AVANT L'INSTALLATION, VOTRE SANGLE DOIT RESSEMBLER À CEÇI.

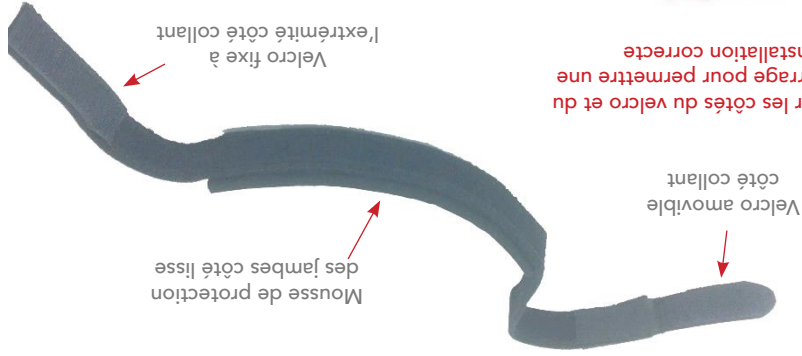

Inspecter les côtés du velcro et du rembourrage pour permettre une installation correcte



Instruction pour le côté gauche (côté droit similaire mais dans la direction opposée)



Fermer le velcro autour du montant interne

La sangle devrait ressembler à ça. Placer la sangle près du point de rencontre supérieur sur le montant interne



2

1



La sangle de cheville est tournée vers l'extérieur. Une fois installée sur la chaussure du côté gauche, elle doit ressembler à ceci. (Le côté droit doit être à l'opposé)



Placer la sangle de cheville sur le côté extérieur du pied



Attacher fermement l'embrasse au mollet avant l'installation de la sangle de cheville



Insérer l'extrémité du Velcro sur le côté intérieur entre les entretoises juste derrière le bloc de jonction. Tirer le velcro et l'extrémité de la sangle

8

4

3